

Suture Alan-Glyde



Ouverture facile

1 Déchirer la feuille à l'entaille dans le sens indiqué



2 Abaisser la partie déchirée jusqu'à ce que l'aiguille soit visible



3 Utiliser le porte-aiguille et retirer la suture



ALAN-GLYDE

- Suture chirurgicale synthétique stérile
- Résorbable
- Multifilament
- Acide Polyglycolique tressé et enduit
- Coloré violet avec D & C Violet No.2
- Recouvert d'un revêtement unique de polycaprolactone et stéarate de calcium
- Perte de résistance : 75% après 2 semaines, 50% après 3 semaines, perte de 90% de résistance après 4 semaines
- Absorption totale après 10 semaines (70 jours)
- Aiguille en acier inoxydable enduite de silicone. Facilite le passage sans endommager le tissu

Remarques:

Dispositif médical de classe III à usage unique


Durée de vie: 5 ans à partir de la date de fabrication

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C

Dimensions boîte : 62x130x62 mm

Dimensions

Référence	Profil de l'aiguille	Description de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (mm)	Taille	Longueur du fil (cm)
SUTPG3	3/8	Tranchant inversé	19	3/0	70
SUTPG4	3/8	Tranchant inversé	19	4/0	70
SUTPG5	1/2	Tranchant inversé	16	5/0	70

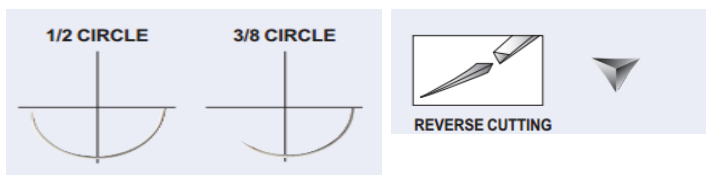

Conditionnement

Pièces/Boîte	Boîtes/Carton
12	216

Nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 13485 et dispositifs homologués CE



ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium

Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

www.alan.be – info@alan.be

Version 03/2017